

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)96-26-47

www.zoll.nt-rt.ru | | zof@nt-rt.ru

Технические характеристики на тренажеры автоматического внешнего дефибриллятора AED Powerheart G5 Trainer компании ZOLL

Комплект поставки

В комплект поставки тренажера АВД должно входить следующее:

- ◆ Тренажер Powerheart® G5 (1) Для его работы необходимы три батарейки типа С (не входят в комплект поставки)
- ◆ Обучающие наклейки для взрослых (1 пара)
- ◆ Инфракрасный пульт дистанционного управления (1)
Для его работы необходимы две батарейки типа ААА (не входят в комплект поставки)
- ◆ Руководство по эксплуатации и языковые пакеты на компакт-диске
- ◆ Схема для автоматической версии
- ◆ Инструкция по настройке языка

Техника безопасности

Перед использованием тренажера ознакомьтесь со следующей информацией:



ВНИМАНИЕ! Может привести к травме или смерти пациента.

Тренажер АВД не является спасательным устройством и с его помощью нельзя провести дефибрилляционный терапевтический разряд. Тренажер АВД предназначен только для демонстрации и обучения.

Чтобы избежать недоразумений, не храните тренажер АВД или обучающие наклейки АВД вместе с другим оборудованием АВД.

Во избежание недоразумений при обращении с тренажером АВД и другими устройствами, описанными в этом руководстве, используются следующие термины:

- ◆ Спасательный (включая слово "спасательный") — любое устройство или приспособление для проведения терапевтического разряда (например, АВД Powerheart® G5 Автоматический является спасательным АВД).
- ◆ Обучающий, тренажер (включая слова "обучающий" или "тренажер") — любое устройство или приспособление, используемое для демонстрации функциональных возможностей АВД (например, обучающие наклейки АВД не могут провести терапевтический разряд).

Описание тренажера АВД

Тренажер АВД является имитатором АВД, предназначенным для обучения работников служб оперативного реагирования, которые используют АВД фирмы Cardiac Science основным навыкам спасения и правильной методике дефибрилляции.

Тренажер АВД может:

- ◆ Имитировать каждый шаг спасения
- ◆ Изменять план действий (доступно 4 плана действия)
- ◆ Создавать имитированные планы действий спасения с применением разряда и без его применения

Инструктор управляет тренажером АВД при помощи пульта дистанционного управления

Комплектация тренажера АВД

Тренажер АВД выглядит так же, как и спасательный АВД.

Примечание: В тренажере АВД используются специальные обучающие наклейки только для демонстрации их правильного размещения. Обучающие наклейки не могут выполнить разряд или обеспечить обратную связь.

Тренажер АВД может работать в полуавтоматическом или автоматическом режиме.

Для получения подробного описания комплектующих спасательного АВД обратитесь к соответствующему руководству по эксплуатации данного АВД.

АВД Powerheart® G5

Тренажер автоматического внешнего дефибриллятора (АВД) предназначен для обучения основным спасательным навыкам при помощи АВД и выполнения правильной методики дефибрилляции.

Характеристики

В следующей таблице приведены характеристики тренажера АВД:

Таблица 3: Характеристики

Параметр	Значение
Габаритные размеры	Высота: 8 см (3,3 дюйма) Ширина: 24 см (9,5 дюймов) Длина: 8 см (12,5 дюймов)
Условия эксплуатации и хранения	Температура: от 0 °С до 50 °С (от 32 °F до 122 °F) Влажность: от 5% до 95 % (без конденсации)
Условия транспортировки (сроком до одной недели)	Температура: от -40 °С до +65 °С (от -40 °F до +149 °F) Влажность: от 5% до 95 % (без конденсации)
Батарея	Тренажер АВД: три щелочные батарейки, типа С Пульт дистанционного управления: две щелочные батарейки, типа ААА
Излучение	Электромагнитное излучение: EN 55011, группа 1, категория В radiowych (RF) : CISPR 11, Группа 1, класс В
Помехоустойчивость	Электромагнитное излучение: EN 61000-4-3 Магнитные поля: EN 61000-4-8 Электростатический разряд: EN 61000-4-2

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)96-26-47

www.zoll.nt-rt.ru | | zof@nt-rt.ru